

HU

OCUTEIN[®]

MEDICAL

GÉL SZEMCSEPP

Használati utasítás - olvassa el figyelmesen!

OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp

Mielőtt elkezdene használni az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcseppet, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót! Ne dobja el ezt a tájékoztatót, mert fontos információkat tartalmaz! Ha bármilyen kérdése van az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcseppel kapcsolatban, forduljon orvosához, gyógyszerészéhez vagy a forgalmazóhoz.

1. Mi az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp, és mire használható?

Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp egy orvostechnikai eszköz, amely medEctoⁱⁿ® 20 mg/ml (2,0%) hatóanyagot tartalmaz – egy természetes sejtvédő molekulát, amely gyulladáscsökkentő és membránstabilizáló tulajdonságokkal rendelkezik. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp egy viszkozus izotóniás oldat, amely a száraz, irritált és gyulladt szemek kezelésére, illetve az ilyen panaszok megelőzésére használható. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp csökkenti az égő érzést, a viszketést, az idegentest-érzetet, és segít az allergének által okozott kötőhártya-gyulladás kezelésében. Enyhíti az allergiás tüneteket, például a szem vörösségét, viszketését és könnyezését. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp védelmet nyújt az allergének káros hatásaival szemben, és támogatja az irritált és érzékeny kötőhártya regenerációs folyamatait, például szemműtétek vagy a szemserülés utáni sebgyógyulást. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp **medEctoⁱⁿ® Hydro Complex** tartalmaznak, amely hatékony vízmegkötő képes-ségének köszönhetően megvédi a szemsejteket a hiperoszmolaritástól. Preklinikai adatok alapján az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp a hagyományos szemcseppkehez képest intenzívebb és hosszabb ideig tartó hidratálást biztosítanak a száraz és irritált szemek számára, mivel tovább maradnak a szem felszínén. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp stabilizálja a könnyfilm lipíd rétegét, csökkenti a további kiszáradást, és védi a szem sejtjeit a hiperoszmolaritástól. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp megnyugtatja az irritált és fáradt szemet, valamint enyhíti az allergiás tüneteket (vörös, viszkető és könnyező szemek). Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp minden korosztály számára alkalmas. Kontaktlencsét viselők és érzékeny szeműek is használhatják, valamint megelőző kezelésként is alkalmazható. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp tartósítószer- és foszfátmentes. 100%-ban természetes összetevőkből alapul hatása. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp nappali és éjszakai használatra egyaránt alkalmas.

2. Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp nem alkalmazható a medEctoⁱⁿ® vagy a szemcsepp bármely más összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.
- Ha a készítmény használata következtében allergiás reakció lép fel, az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp alkalmazását azonnal abba kell hagyni.
- Ne használja sérült vagy lyukas csomagolás esetén.
- A biztonságos és higiénikus használat érdekében minden szemcseppet csak egy személy használjon.
- Felbontás után legfeljebb 3 hónapig használható.
- Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp gyermekektől elzárva tartandó
- Felhívjuk figyelmét, hogy az OCUTEIN[®] MEDICAL Gél szemcsepp alkalmazása után átmenetileg homályos látás tapasztalható. Ebben az esetben a felhasználónak nem szabad gépjárművet vezetnie vagy gépeket kezelnie. Várja meg, amíg a normál látásélesség visszatér.

3. Tudnivalók az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp használatának megkezdése előtt

Nem állnak rendelkezésre adatok az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp és más szemcsepp vagy szemkenőcsök közötti kölcsönhatásokról, ezért más szemészeti kezelésekkal együtt történő alkalmazása nem javasolt.

4. Hogyan kell alkalmazni az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcseppet?

- Az OCUTEIN[®] MEDICAL Gél szemcseppet mindig a jelen használati utasításnak megfelelően használja. Ha bizonytalan, használata előtt forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. Ha kezelőorvosa másként nem rendelkezik, naponta többször 1-2 cseppet alkalmazzon mindkét szemébe. A 2 évesnél fiatalabb gyermekeknél nem haladhatja meg a napi 7 alkalmazást (1-2 csepp a szembe). A 2 évesnél idősebbeknél nincs adagolási korlát. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp szükség esetén óránként többször is alkalmazható.
1. Az OCUTEIN[®] MEDICAL Gél szemcsepp első alkalmazása előtt vegye le a biztonsági gyűrűt a flakonról.
 2. Az OCUTEIN[®] MEDICAL Gél szemcsepp használata előtt ajánlott kezét mosni.
 3. Távolítsa el a védőkupakot a palackról, és ne érintse meg a palack szabadon lévő hegyét.
 4. Hajtsa kissé hátra a fejét.
 5. Fogja a flakont fejjel lefelé, hüvelyk- és mutatóujja között tartva, és ügyeljen arra, hogy függőlegesen tartsa.
 6. Óvatosan nyissa ki a szemét a másik keze hüvelykujjával és mutatóujjával, vagy óvatosan húzza le az alsó szemhéjat, hogy létrehozzon egy kis zsebet, és nézzen felfelé.
 7. Helyezze a cseppentő végét az alsó szemhéjhoz, de ne engedje, hogy hozzáérintse a szemhez.
 8. Finoman nyomja meg az üveget, hogy egy cseppet engedjen a szem és a szemhéj között kialakított zsebbe.
 9. Lassan csukja be a szemét, hogy a folyadék egyenletesen eloszoljon a szem felszínén.
 10. Ismétlje meg az eljárást a másik szemén.
 11. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp minden egyes használata után óvatosan helyezze vissza a védőkupakot.

5. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp esetleges mellékhatásai

Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp általában jól tolerálható. Nem ismertek rendszeresen előforduló vagy tartós mellékhatások.

Ritka esetekben a szemcsepp átmeneti szemirritációt, szemvörösséget vagy kötőhártya-gyulladást okozhat. Kérjük, tájékoztassa orvosát, gyógyszerészt vagy a forgalmazót, ha a szemcsepp használatával összefüggő mellékhatásokat észlel. Ha a tünetek tartósan fennállnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhöz.

6. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp tárolása

Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp lejárati ideje a dobozon és a palackon van feltüntetve. A szemcsepp nem használható fel a lejárati idő után. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcseppet 2 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

7. További információk

Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp rendeltetészerű használata esetén, **nincs bizonyíték különös kockázatra terhesség vagy szoptatás ideje alatt.**

A készítmény alkalmazható szemeszeti műtétek vagy egyéb szemserülések után a sebgyógyulás elősegítésére. A készítmény gyermekek számára is alkalmas. Ugyanakkor segítséget kell nyújtani a használat során a 10 éves vagy fiatalabb gyermekeknek és azoknak a betegeknek, akik nem képesek önállóan alkalmazni az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcseppet.

8. Az OCUTEIN[®] MEDICAL gél szemcsepp tartalma:

10 ml oldat

9. Összetétel:

medEctoⁱⁿ® 20 mg/ml (2,0%), hidroxil-etil-cellulóz, nátrium-klorid, víz és citrát puffer.

bitop AG,
Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Németország.

CE 0197

Forgalmazó: Simply You Hungary Kft., 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A.

További információk:

marketing-hu@simply-you.eu

www.simply-you.hu

A felülvizsgálat dátuma: 2025. április

SimplyYou
Pharmaceuticals

A TERMÉKEN FELTÜNTETETT SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA:							
CE-jelölés a notifikált szervezet számvál	Medical device/Orvostechnikai eszköz	A készítmény steril, aszeptikus zárt üvegtartályban készült.	Használat előtt olvassa el a használati utasítást.	Felhasználható a megadott időpontig (lejárati idő).	Gyártási szám	Hőmérséklet korlátozás	Gyártó
						Ne használjon sérült vagy lyukas csomagolású terméket	Az üres csomagolás a háztartási szemétként kezelendő

5950201041